




Conexiones ENFit® fáciles de usar, gracias al innovador conector macho móvil ENSwivel®

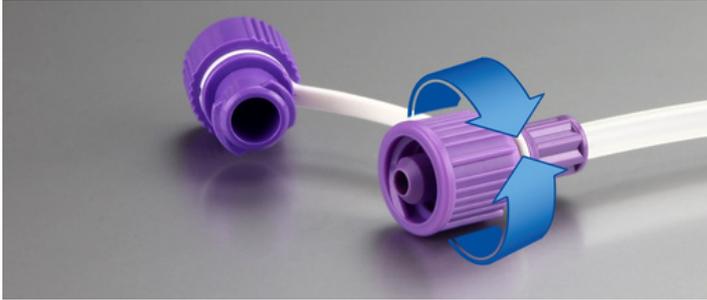

ENSwivel® es un innovador conector macho móvil diseñado para rodear el conector ENFit®. Con un simple "Giro de Dos Dedos", el ENSwivel® garantiza conexiones ENFit® fáciles, firmes y seguras en todos los sets de extensión, sondas y llaves de paso de danumed®. Simple, rápido, cómodo.

ENSwivel® transforma el proceso de conexión, mejorando la manipulación para el usuario y el confort del paciente. Maximiza sus beneficios siguiendo las instrucciones a continuación para un uso correcto.

Conexión del tapón al conector ENFit®



Conexión de 2 sistemas ENFit®



Utiliza un simple "Giro de Dos Dedos" para una conexión firme y segura, girando únicamente el conector macho móvil ENSwivel®.

Disfruta de **conexiones sin torsión**, ya que solo se gira el ENSwivel®, no todo el sistema.

Deja de girar cuando sientas resistencia; esto indica una conexión ajustada con el espacio visible correcto.

Escanea el código QR y mira el vídeo sobre el proceso de conexión sin esfuerzo con el ENSwivel®.



www.danumed.com/enswivel

¡Un mañana más seguro comienza con ENFit®!

Los conectores ENFit® son más que una innovación tecnológica: ¡son un compromiso con la seguridad del paciente! Reconocido a nivel mundial como la principal iniciativa de seguridad del paciente en la nutrición enteral, ENFit® garantiza conexiones seguras y sin riesgos tanto para los pacientes como para los proveedores de atención médica.


Por ejemplo, una conexión inadvertida entre una alimentación enteral y una línea intravenosa podría resultar en la infusión de nutrientes en el sistema vascular, lo que podría causar daños severos o incluso consecuencias fatales para el paciente.

La norma ISO 80369-3 fue establecida por la Organización Internacional de Normalización (ISO) para mitigar este riesgo en la sección enteral.



¿Sabías que?

- ... todos los productos de danumed están equipados con conectores ENFit® de acuerdo con la norma ISO 80369-3.
- ... danumed Medizintechnik GmbH es miembro de GEDSA, la Asociación Global de Proveedores de Dispositivos Enterales, Inc.
- ... ENFit® es una marca registrada de GEDSA.
- ... GEDSA creó la iniciativa Stay Connected para coordinar y apoyar la implementación global de ENFit®.

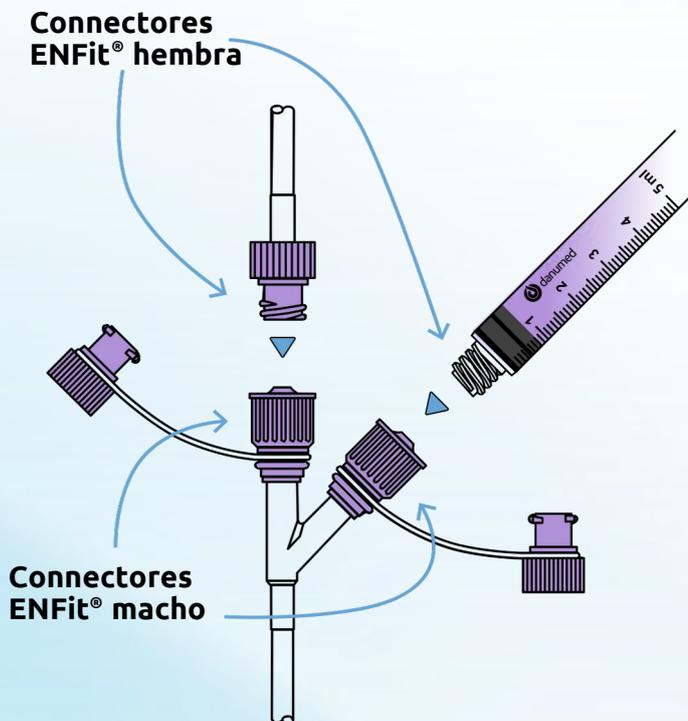

Los conectores ENFit® tienen un diseño único específico para enteral que...

- ... es mecánicamente incompatible con conectores Luer y otros sistemas de conexiones
- ... minimizan el riesgo de conexiones erróneas

Conectividad ENFit®

Un conector ENFit® hembra siempre se conecta a un conector ENFit® macho.

ENFit® macho:	ENFit® hembra:
<ul style="list-style-type: none">• Sondas de Alimentación• Sets de extensión	<ul style="list-style-type: none">• Sets de administración• Jeringas enterales

danumed Medizintechnik GmbH – las soluciones individuales son nuestro estándar.

Somos una innovadora empresa de tecnología médica alemana con los más altos estándares de calidad, muchos años de experiencia en nutrición enteral y un claro enfoque en el cliente. También cumplimos con las solicitudes individuales de los clientes con flexibilidad y fiabilidad. Personal, competente, colaborativo.

danumed Medizintechnik GmbH • Stadthof 18 • 93059 Regensburg • Germany
Tel + 49 (0) 941/ 890 588-80 • Fax + 49 (0) 941/ 890 588-81
info@danumed.com • www.danumed.com