



Escanee el código QR y vea el video sobre el proceso de conexión con el ENSwivel®.

- Los conectores ENFit® minimizan el riesgo de conexiones erróneas y reducen el riesgo de daños para el paciente

¿PORQUÉ ENFit®?

- Incompatible con conectores Luer u otros sistemas (ISO 80369-3)
- un nuevo diseño estándar para conectores enterales
- Iniciativa mundial para la seguridad del paciente con

¿QUÉ es ENFit®?

ENSwivel® es una marca registrada de danumed Medizintechnik GmbH.

- Sets de extensión danumed® para botón de gastrostomía
- Sonda de gastrostomía danumed®
- Llaves danumed®

Productos con ENSwivel®:

- Conexión sin esfuerzo con un simple "giro de dos dedos".
- Conexión segura y ajustada
- Sin torsión; no se retuercen los tubos
- Sencillo, rápido, cómodo

¿PORQUÉ ENSwivel®?


- Anillo giratorio alrededor del conector ENFit®
- Sólo se gira el anillo ENSwivel®, no todo el sistema

¿QUÉ es ENSwivel®?

Global Trust in German Design & Quality



Cómo utilizar el innovador **ENSwivel®** para conexiones **ENFit®** seguras y sencillas

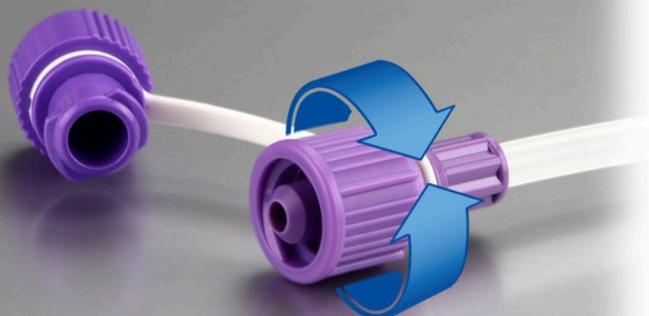

Cómo conectar el tapón al conector ENFit® con el anillo giratorio ENSwivel®



- Fácil "GIRO DE DOS DEDOS" para una conexión segura y ajustada

- SÓLO gire el ENSwivel®
- NO gire el tapón
- STOP a la resistencia

- ESPACIO = correcto y ajustado
- SIN ESPACIO = demasiado ajustado



Con ENSwivel®

- MANEJO SENCILLO, RÁPIDO Y CÓMODO



Cómo conectar dos sistemas ENFit® con el anillo giratorio ENSwivel®



- Fácil "GIRO DE DOS DEDOS" para una conexión segura y ajustada

- SÓLO gire el ENSwivel®
- NO gire el tapón
- STOP a la resistencia

- ESPACIO = correcto y ajustado
- SIN ESPACIO = demasiado ajustado



Con ENSwivel®

- LOS TUBOS NO SE RETUERCEN
- MAYOR COMODIDAD PARA EL PACIENTE Y EL USUARIO

